



Röger™ en ambientes sonoros complicados

Oír mejor con ruido y a distancia

Mejora la comprensión

La tecnología de audífonos actual realiza un trabajo excelente a la hora de mejorar la comprensión verbal. Sin embargo, hasta los audífonos más potentes presentan limitaciones, especialmente en lugares ruidosos o a distancia. En esos casos, es necesario contar con micrófonos inalámbricos modernos para aumentar el rendimiento y subsanar la falta de comprensión. Aquí es donde destaca de verdad la gama inalámbrica digital Roger.

La cartera de productos consta de micrófonos y receptores que funcionan captando la voz de un orador y transmitiéndola de forma inalámbrica al oyente a la vez que se reduce el ruido ambiente. Puede escuchar el discurso con claridad en reuniones o eventos sociales, consiguiendo que la audición sea un placer.





Roger en ambientes sonoros complicados

Ya se encuentre en un restaurante, en el trabajo o en la comodidad del hogar, la comprensión verbal es importante para llevar una vida completa. La tecnología Roger le permite disfrutar de conversaciones nítidas, sin el estrés y la confusión que produce el ruido ambiente.

Roger en el entorno laboral

La vida laboral moderna es muy exigente, especialmente con la habilidad de las personas para comunicarse. Las reuniones pueden entrañar dificultades de audición para las personas con pérdida auditiva. Algunos de los mayores obstáculos los causan las conversaciones paralelas, el ruido ambiente o la distancia entre usted y la persona que se encuentra al otro lado de la mesa.

Roger en el entorno privado

A muchas personas con pérdida auditiva les encantaría escuchar bien y comprender el habla en entornos sociales bulliciosos. En estas situaciones, Roger es la solución perfecta para ayudarlo a mantenerse conectado, sea cual sea el ambiente sonoro.


Oír mejor en situaciones ruidosas con la tecnología MultiBeam

La teoría es sencilla: cuantas más palabras pronunciadas pueda comprender, más disfrutará de la comunicación.

La tecnología MultiBeam es una innovadora función del micrófono Roger de Phonak. Le permite experimentar una comprensión verbal excepcional en conversaciones de grupo, como en reuniones de empresa o en restaurantes ruidosos.

Al utilizar múltiples micrófonos en seis direcciones, se calcula y se compara la comprensión verbal desde un radio de 360°. Por ello, se selecciona automáticamente la dirección con la mejor claridad. El resultado: la comprensión verbal mejora un 61 % en una conversación en grupo con 75 dBA de ruido, en comparación con el uso de audífonos solamente¹.

La tecnología MultiBeam está ahora disponible en el Roger Table Mic II y el Roger Select™.

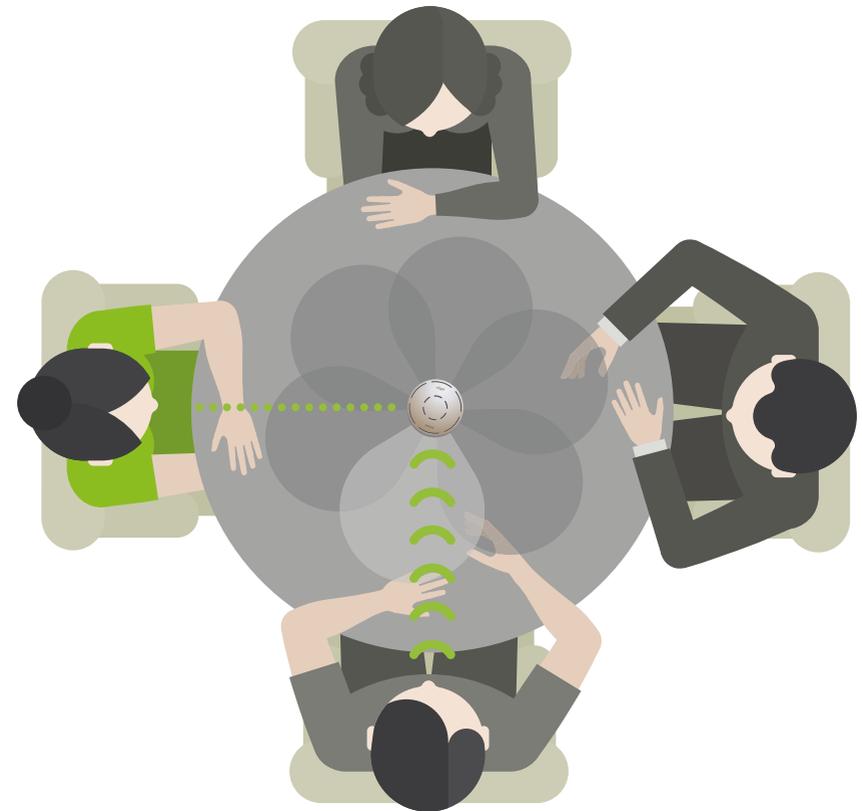

La tecnología MultiBeam utiliza varios micrófonos apuntando en seis direcciones y selecciona automáticamente la persona que está hablando.

¹ A partir de datos preliminares. Artículo con revisión científica y Field Study News en preparación, disponible a finales de 2018 en www.phonakpro.com/evidence.

Concéntrese en el trabajo más que en la audición

El Roger Table Mic II es un micrófono diseñado para adultos trabajadores que participan en diversas reuniones.

Participe por completo en reuniones más grandes

Para abarcar una reunión grande, varios Roger Table Mic II pueden funcionar de forma conjunta en una red MultiTransmisor. Con un alcance de más de 20 metros, podrá participar por completo y no se perderá nada.

Elija cómo desea oír en reuniones grandes

Algunas reuniones son más ruidosas que otras. El rango de selección ajustable le permite adaptar su comodidad auditiva y elegir la forma en la que oye. Seleccione un rango de selección amplio para poco ruido ambiente, o un rango de selección más concreto cuando haya ruido ambiente.



Diseñado para lograr un manejo sencillo

El Roger Table Mic II puede funcionar de manera completamente automática, por lo cual fácil de usar. Con 16 horas de duración de la batería*, aguantará con facilidad un día de trabajo completo.

El diseño discreto hace que se integre perfectamente con el resto del equipo de la reunión. Para un uso más discreto, puede elegir hacer funcionar el micrófono de mesa con el mando a distancia.

* Con 16 horas duración de la batería, el Roger Table Mic II dura una jornada laboral completa; véase la hoja de datos del Roger Table Mic II.

Siéntase integrado en la conversación



El Roger Select es un micrófono versátil ideal para las situaciones en las que el usuario está quieto y en las que se escucha ruido ambiente, como en restaurantes.

Siéntase parte de toda la conversación

Al colocarlo en el centro de una mesa, selecciona de forma automática la persona que habla y cambia sin problemas de un orador a otro.

Obtenga el control, decida a quién desea oír

En situaciones donde tienen lugar varias conversaciones, seleccione con un simple toque manual a la persona que quiere oír y la conversación en la que quiere centrarse.

Disfrute de los momentos valiosos

Sus amigos y familiares pueden colocarse el Roger Select en la ropa o colgárselo al cuello, para que pueda disfrutar claramente de todos los momentos valiosos.

Disfrute de la televisión y haga llamadas telefónicas con las manos libres

El Roger Select cuenta con Bluetooth® de banda ancha para llamadas telefónicas y puede transmitir el sonido de televisores, reproductores de música, ordenadores y otros dispositivos.

Micrófonos Roger adicionales

Además de los nuevos micrófonos: Roger Table Mic II y Roger Select, hay otros micrófonos Roger avanzados que pueden responder a sus necesidades.



Roger Pen™

El Roger Pen es un práctico micrófono pensado para varios ambientes sonoros. Gracias a su diseño portátil, se puede utilizar fácilmente a distancia y con ruido. Tiene Bluetooth de banda ancha para llamadas telefónicas.



Roger EasyPen

El Roger EasyPen es un micrófono simple pero efectivo, con solo dos botones. Es el indicado para usted si desea la máxima sencillez con todo el rendimiento de Roger.



Roger Clip-On Mic

El Roger Clip-On Mic es un micrófono pequeño diseñado para conversaciones entre dos personas. Como cuenta con un micrófono direccional, puede centrarse en una conversación con su compañero.





Receptores Roger

Gracias a los tres tipos diferentes de receptores disponibles, casi siempre hay una solución Roger para usted, independientemente del tipo de audífonos o implantes que tenga.



Receptores Roger de diseño integrado

Estos modelos están diseñados para adaptarse a los audífonos de Phonak. También están disponibles para determinados implantes cocleares de Advanced Bionics, Cochlear y MED-EL.



Roger X

Este receptor universal Roger en miniatura es compatible con muchos audífonos retroauriculares, procesadores de sonido de implantes cocleares y emisores.



Roger MyLink

Este receptor Roger con collar funciona con cualquier audífono o implante coclear que incorpore la función de bobina inductiva.

Roger en el entorno laboral

Sin importar la situación, los micrófonos Roger son siempre fáciles de usar y le permiten comunicarse, participar y contribuir en el trabajo.




Reuniones pequeñas

Incluso las reuniones pequeñas pueden ser abrumadoras para alguien que use audífonos. Con solo colocar un micrófono de mesa en la mesa de reuniones, podrá escuchar mejor a sus compañeros*.



Reuniones grandes

Si participa en reuniones grandes, varios micrófonos de mesa funcionarán de maravilla al captar todas las voces de la mesa. Puede usar tantos Roger Table Mic II como necesite. Transmiten el discurso a los audífonos independientemente de donde proceda la voz.

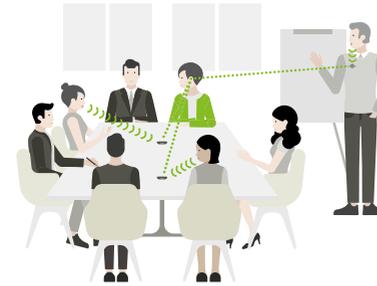

Reuniones con oradores

Los oradores a menudo están de pie alejados de la mesa de reunión. Cuando el orador lleva un micrófono Roger que funciona con el micrófono de la mesa, puede oír claramente el discurso tanto del orador como de los participantes de la reunión.




Conversaciones entre dos personas en ambientes ruidosos

Si está rodeado de ruido molesto, la solución más efectiva es que su colega se cuelgue un micrófono Roger al cuello o se lo coloque en la solapa.



Multimedia

Las tecnologías como los sistemas de videoconferencia y llamadas por Internet se usan frecuentemente en el entorno de trabajo. Los micrófonos Roger facilitan la audición del sonido. Simplemente conecte el micrófono Roger utilizando el cable de audio para transmitir estos sonidos directamente a sus oídos.

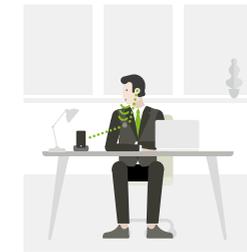

Llamadas telefónicas

Realizar llamadas telefónicas puede ser un gran reto para las personas afectadas por una pérdida auditiva. Al conectar el Roger Pen o el Roger Select al teléfono u ordenador por Bluetooth o cable, puede escuchar llamadas telefónicas directamente a través de sus audífonos o implante coclear.

* A partir de datos preliminares. Artículo con revisión científica y Field Study News en preparación, disponible a finales de 2018 en www.phonakpro.com/evidence

Roger en el entorno privado

La tecnología Roger le devuelve la "vida" a su vida social, ya que le ayuda a mantenerse conectado sin importar cuál sea el ruido ambiente o el entorno auditivo.



Cena con amigos o familiares

Las mesas de bares y restaurantes a menudo pueden suponer un verdadero reto auditivo debido a la compleja combinación de conversaciones, música de fondo y el entrecocar de cubertería y vasos. Una solución como Roger Select elimina estos ruidos molestos y le ayuda a captar cada palabra.



En fiestas

Cuando hay música de fondo, gente hablando y riéndose, Roger transmite la conversación directamente a sus oídos. El Roger Pen es un micrófono ideal para estos ambientes sonoros. Gracias a su diseño similar a un bolígrafo, tiene un aspecto atractivo y es fácil de usar.



En casa

En casa, un micrófono Roger reduce el molesto ruido ambiente como el traqueteo de los utensilios de cocina o el sonido a todo volumen de la televisión. Esto le permite disfrutar completamente de las conversaciones con familiares y amigos.



En el coche

El ruido del motor, de la carretera y los pasajeros colocados de espaldas a usted hacen que las conversaciones sean complicadas. Al transmitir las palabras del orador directamente a sus oídos, Roger le ayuda a superar los desafíos comunicativos. Oír en el coche vuelve a ser un placer.



Llamadas telefónicas

Disfrute hablando por teléfono con solo conectar el Roger Pen o el Roger Select al teléfono u ordenador por Bluetooth o cable.



Ver la televisión

Los micrófonos Roger se pueden conectar fácilmente a la salida de audio de su televisor. De esta manera, puede oír sus programas favoritos sin tener que subir el volumen del televisor.

Descubra qué micrófono Roger se adapta a sus necesidades auditivas



Dé el siguiente paso para descubrir qué sistema Roger es el mejor para usted. Hable con su audioprotesista o consulte más información en www.easyguide.phonakpro.com





Siguiente paso

Participe y contribuya sin esfuerzo en contextos con compañeros de trabajo, amigos y familiares. Roger garantiza que oiga todo en sonido de alta calidad, permitiéndole concentrarse en la conversación sin distracciones.

Reembolso

Los sistemas Roger que necesita en su entorno de trabajo a menudo se reembolsan parcial o completamente. A veces también se ofrece un reembolso para soluciones destinadas a la vida privada. Los audioprotesistas que ofrecen la cartera de productos Roger pueden ayudarle a solicitar el reembolso y ayudarle en el proceso de solicitud.

Descubra más sobre qué solución de Roger satisface sus necesidades. Hable con su audioprotesista o consulte más información en www.phonak.es

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

www.phonak.es